

BE Clean Cleaning solution

Para el lavado de la aguja sobre Behnk Thrombolyzer series

REF 771800: CL (16 x 15 mL)

USO PREVISTO

Este reactivo es para uso profesional en laboratorio (método automatizado). Permite el lavado de la aguja de muestra para evitar la contaminación cruzada sobre Behnk Thrombolyzer series.

PRINCIPIO

Esta solución lava la aguja de muestra entre cada pipeteo para evitar la contaminación cruzada entre pruebas. La solución de lavado disuelve el plasma y los residuos de reactivo que puedan adherirse a la aguja. Los residuos disueltos y la solución de lavado se eliminan enjuagando con agua desmineralizada fresca. El proceso de lavado se activa automáticamente durante el funcionamiento rutinario de la unidad.

GENERALIDADES

La aguja se conecta a la jeringa a través del tubo de pipeteo. La aguja aspira y dispensa los líquidos a medida que el émbolo de la jeringa sube o baja. Sólo la punta de la aguja está en contacto con los líquidos y es lavada por la estación de lavado. Luego, el agua de enjuague fluye desde la estación de lavado al contenedor de "residuos líquidos".

REACTIVOS

CL Clean Solución de lavado
Solución ácida

Según el Reglamento 1272/2008, este reactivo no está clasificado como peligroso.

PRECAUCIONES ⁽¹⁾ ⁽²⁾

- Consulte la FDS actual disponible bajo petición o en www.behnk.de
 - Verificar la integridad de los reactivos antes de su uso.
 - Eliminación de residuos: cumplir con la legislación vigente.
 - Trate la muestra o reactivo de origen biológico como potencialmente infeccioso. Respetar la legislación vigente en el país.
- I Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo estará sujeto a notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

CL: Listo para usar

ESTABILIDAD Y CONSERVACION

Antes de abrir, almacenado protegido de la luz a 2-25 °C, el contenido es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Antes de abrir:

- Estabilidad a bordo (OBS)* 6 días

* 15-25 °C, en el vial original abierto

- No completar.
- Deseche el volumen restante cuando el analizador indique « empty volume ».
- Rechazar cualquier reactivo turbio.
- Utilice reactivos después de la fecha de caducidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Analizador automático Behnk Thrombolyzer
BE Reactivos, estándares y controles

CONTROL DE CALIDAD

- Compruebe la integridad de los viales antes de su uso.
- Rechazar cualquier reactivo turbio.

PROCEDIMIENTO

- Abrir el vial
- Apuntar la fecha de apertura
- Posicionar directamente sobre el analizador en posición dedicada
- Utilizar según las indicaciones del manual del analizador Behnk

PRESTACIONES

Ninguna contaminación cruzada detectada utilizando la Cleaning Solution en las condiciones preconizadas en el manual de usuario BEHNK Thrombolyzer system.

REFERENCES

- Occupational Safety and Health Standards ; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998) ; 6, p.267-280
- Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12

| = Modificaciones significativas

Fabricante	Caducidad	Diagnostico In Vitro	Temperatura	Referencia	Consultar Instrucciones	Número de lote	Almacenar protegido de la luz	Suficiente para	Diluir con	Agua desmineralizada	Riesgo biológico